

COLHEITA DE HEMOCULTURAS COM AGULHA & SERINGA



COLHEITA DE HEMOCULTURAS*

- Não usar garrafas danificadas ou fora de validade.
- Retirar a tampa. Desinfetar & permitir secar ao ar.
- Colher 2-3 hemoculturas.
- 10 ml de sangue por garrafa, para paciente adulto.
- Volume baseado no peso, para pacientes pediátricos.**
- Transportar para o laboratório logo que possível.

RECOMENDAÇÕES PARA COLHEITA DE HEMOCULTURAS

1	VERIFICAR A ID DO PACIENTE & PREPARAR O MATERIAL	2	PREPARAR AS GARRAFAS PARA INOCULAÇÃO	3	PREPARAR O LOCAL PARA PUNÇÃO VENOSA	4	COLHER COM AGULHA E SERINGA
			<p>Lavar as mãos ou desinfetá-las com álcool.</p> <p>Retirar a tampa de plástico.</p> <p>Desinfetar o septo da garrafa e deixar secar.</p>		<p>Palpar para encontrar a veia.</p> <p>Calçar luvas limpas.</p> <p>Desinfetar a pele.</p> <p>Deixar secar ao ar.</p>		<p>Conectar a agulha e a seringa.</p> <p>Para prevenir a contaminação, não voltar a palpar.</p> <p>Puncionar a veia preparada.</p>
5	INOCULAÇÃO DA GARRAFA	6	TERMINAR O PROCEDIMENTO	7	ETIQUETAGEM CORRETA	NUNCA	
	<p>Preencher primeiro a garrafa de anaeróbios.***</p> <p>Certificar-se de que a garrafa está corretamente preenchida até à linha da marca, como demonstrado.</p> <p>Repetir o procedimento para a garrafa de aeróbios.</p>		<p>Registar a data da colheita, hora e local da punção.</p> <p>Etiquetar as garrafas de acordo com as recomendações do fabricante.</p> <p>Transportar as garrafas inoculadas, tão rápido quanto possível à temperatura ambiente, para o laboratório.</p>			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Deixar algodão em cima do septo</div> <div style="text-align: center;"> Recolocar a tampa de plástico</div> <div style="text-align: center;"> Colocar a etiqueta no local errado</div> </div>	

* As melhores práticas para a colheita de hemoculturas variam consoante os países e as instituições de cuidados de saúde: consulte as orientações aplicáveis na sua instituição. Este cartão baseia-se nas recomendações da Organização Mundial de Saúde para colheitas de sangue (WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy-2010-ISBN 978 92 4 159922 1).

** Garrafas pediátricas disponíveis.

*** Encha primeiro a garrafa de anaeróbios se houver volume de sangue suficiente para encher também a garrafa de aeróbios com o volume de sangue recomendado.

CHEKLIST P/ COLHEITA, COM SISTEMA BUTTERFLY

- Desinfetante de pele aprovado
- Garrafas para hemoculturas (idealmente 2 a 3 hemoculturas; 1 hemocultura = 1 garrafa para aeróbios + 1 para anaeróbios)
- Agulha e seringa
- Tubos de colheita de sangue (se for necessário colher sangue para outros testes de laboratório)
- Adaptador de tubo p/colheita (se necessário)
- Luvas
- Toallete descartável
- Torniquete
- Gaze
- Penso
- Recipiente para resíduos
- Caneta para registar a data da colheita, hora e local

NOTA: colher SEMPRE a hemocultura PRIMEIRO